

UK NEQAS BTLT Antenatal Antibody Titration (ANT) Pilot Scheme

Istruzioni esercizio 24ANT3

Distribuito il 22/07/24 – Chiusura il 01/08/24

Materiale fornito - fare riferimento alla scheda COSHH fornita per le istruzioni di manipolazione dei campioni

https://haembtlp.ipassportqms.com/document_download/NTM4NDMxZDMtOGI4NS00Mzg0LTk5MDItODU5ZDA0M2YwYjg3

Campioni di plasma - centrifugare prima dell'uso

- Un campione di plasma, etichettato come Campione 1, per il quale è richiesta la titolazione anticorpale
 - Prelevato da una donna durante lo screening antenatale di routine alla 28^a settimana di gestazione.
 - La sua storia ostetrica è G3 P1+1
 - Questo campione ha uno screening anticorpale positivo ed è stato identificato un anti-E.
 - Il partner della donna è risultato omozigote per l'antigene E.

- Un campione di plasma, etichettato come Campione 2, per il quale è richiesta la titolazione anticorpale
 - Prelevato dalla stessa donna in follow up alla 32^a settimana di gestazione.
 - Questo campione ha uno screening anticorpale positivo ed è stato identificato un anti-E.
 - Il partner della donna è risultato omozigote per l'antigene E.

Test e Registrazione risultati

I campioni devono essere trattati come campioni clinici.

Campione 1. Titolare l'anti-E utilizzando la tecnologia IAT che useresti con un campione clinico simile.

Selezionare delle cellule disponibili dalla vostra scorta locale di cellule reagenti con cui effettuare la titolazione anticorpale.

Campione 2. Titolare l'anti-E utilizzando la tecnologia IAT che useresti con un campione clinico simile.

Selezionare delle cellule disponibili dalla vostra scorta locale di cellule reagenti con cui effettuare la titolazione anticorpale.

Registrare la tecnologia utilizzata, la forza di reazione per ciascuna diluizione testata e il titolo riportato. Se si utilizza più di una tecnologia, registrare i risultati per la tecnologia principale utilizzata per i risultati clinici.

Invio dei risultati

Inserire i vostri risultati tramite <https://www.ukneqasbtlp.org/distribution> ed assicurarsi di aver cliccato sul pulsante "Submit" nella pagina di inserimento dati. In questa fase, verrà visualizzato un riepilogo dei risultati inviati che potrà essere stampato per controllo e come registrazione dell'invio. Qualsiasi modifica successiva a questa data (e prima della data di chiusura) richiederà una richiesta ai responsabili dello schema per reimpostare la pagina Web per il nuovo inserimento.

La distribuzione sarà chiusa sul web alla data / ora di chiusura pubblicate e tutti i risultati "salvati" ma non "inviati" saranno raccolti e valutati.

Le istruzioni per l'utilizzo del sito web per l'inserimento dei dati possono essere trovate nel link sottostante.

https://haembtlp.ipassportqms.com/document_download/NzlhMjM2MjYtZDk0Zi00NTY1LTk3NTgtZDNINGQ2ZjJmYWWE5

In caso di problemi con il materiale di esercitazione o per qualsiasi domanda riguardante il completamento dell'esercizio o la presentazione dei risultati, si prega di contattare il team BTLP per un consiglio.

Informazione aggiuntiva

Nessuna per questo esercizio