

Blood Transfusion Laboratory Practice DAT Istruzioni esercizio 25DAT1U e 25DAT1N

I partecipanti UK riceveranno campioni etichettati **25DAT1U**
I partecipanti non UK riceveranno campioni etichettati **25DAT1N**
Queste istruzioni si applicano a entrambi i set di campioni

Distribuzione 17/02/25 – Chiusura 24/02/25

Materiale fornito

Fare riferimento alla scheda COSHH fornita per tutti gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei campioni.

https://haembtbp.ipassportqms.com/document_download/M2ZIYWMzMTETNTYwNi00YjEzLTg3YTItYTNmMzAzN2FIMGY5

- 2 campioni di globuli rossi (in soluzione di Alsever) per il test diretto dell'antiglobulina (DAT).
- Trattare i campioni EQA come se fossero campioni clinici

Test e registrazione risultati

Non c'è alcun contesto clinico associato con questo esercizio, ma si chiede di investigare i due campioni etichettati come *Patient 1* e *Patient 2*, allo stesso modo dei campioni clinici per i quali è richiesto un DAT, ovvero i test DAT iniziali e quelli di follow up.

Preparare i campioni di globuli rossi in maniera appropriata per la tecnologia che utilizzate.

Registrare la data del test, i gradi di reazione e le interpretazioni attraverso il sito UK NEQAS sotto riportato:

<https://www.ukneqasbtlp.org/>

Altre istruzioni per le nuove pagine di inserimento dati potete trovarle sotto cliccando sul link sottostante
https://haembtbp.ipassportqms.com/document_download/OGY5YzNhNDgtYTI5My00NGM3LWE2NzMtNDk1OGM4YmJmMzdk

in caso di problemi con il materiale o qualche domanda riguardo i test o la registrazione dei risultati, si prega di contattare il team BTLP per un consiglio.

Informazione aggiuntiva

Da aprile 2025, non saranno più inviate con i campioni le istruzioni cartacee, il documento COSHH sarà comunque sempre inviato e un collegamento per le istruzioni sarà incluso nel documento COSHH. Puoi trovare le istruzioni per gli esercizi online nella pagina di immissione dati o andando su

<https://www.ukneqash.org/downloads/25DAT1UNInstructions.pdf>